

LIMPIADOR MULTIPROPÓSITO DESINFECTANTE

FICHA TÉCNICA

■ Descripción:

Es un limpiador desinfectante de amplio espectro para uso en superficies inanimadas solidas no porosas de un paso libre de fragancia.

El principio activo de **DSO₄** es un cuaternario de amonio de cuarta generación, lo que le confiere la propiedad de ser un bactericida de amplio espectro muy eficiente con aplicaciones que incluyen una gran variedad de usos, por lo que se recomienda para su uso en distintos tipos de industrias incluidas la del cuidado de la salud.

Efecto de Desinfección: Este producto ha demostrado efectividad contra los siguientes organismos con tiempo de un minuto de contacto: *C. albicans* ATCC 10231, *A. brasiliensis* ATCC 16404, *E. coli* ATCC 11229, *S. aureus* ATCC 6538, *S. typhimurium* ATCC 13311, *P. aeruginosa* ATCC 25619. Utilizando el método descrito en la norma NMX-BB-040-SCFI-1999. Tiene acción en contra de todos los virus de influenza A incluyendo el virus de la influenza A-H1N1 presente en la pandemia de 2009.

■ Instrucciones de uso:

- Para superficies no instrumentales:** limpiar antes a la desinfección, remover la capa de suciedad, esparcir **DSO₄** directamente en la superficie, permitiendo permanecer húmedo por 60 segundos, limpiar la superficie usando una toalla.
- Para usar como una solución de inmersión descontaminante pre limpiadora:** poner los instrumentos en un contenedor con una cantidad suficiente de **DSO₄**, lo suficiente para permitir la completa inmersión, cubrir y mantener inmerso por 5 minutos, posteriormente hay que remover los instrumentos.

Este producto no es un producto para uso en higiene personal. Para obtener un nivel de desinfección adecuado, no se debe diluir el producto.

■ Advertencias:

Producto irritante para ojos y piel. Manténgase en lugares frescos, alejado de calor y flama abierta. Indispensable tenerse fuera del alcance de los niños. Se recomienda para protección personal usar una barrera apropiada para la piel como guantes, botas, máscaras y protección ocular.



Las cadenas gemelas del activo **DSO₄** realiza una limpieza y desinfección altamente eficaz aún en presencia de altas cargas de sólidos orgánicos cuando se usa directamente en artículos como: charolas de alimentos, pisos, pasamanos, perillas, rejillas de cama, mesas, sillas, tocadores, accesorios de baño, superficies exteriores de baños, unidades de baño, teclados, ratones de computadora, archivadores, auriculares, estaciones de trabajo, carros, superficies sólidas, superficies de levantamiento de pesas, entre otros; ya que tiene acción en contra de micro-organismos como: bacterias, hongos, virus y algas.

■ Presentaciones:

500 ml

2L

4L

20L

■ Ingredientes:

- Surfactantes no iónicos.
- Cloruro de didecil dimetil amonio 0.8%.
- Alcohol isopropílico.
- Alcohol etílico.
- Coadyuvantes de procesos.

■ Primeros auxilios:

Contacto con los ojos: manténgalos abiertos y enjuague con agua abundante. Si usa lentes de contacto quíteselos y continúe enjugando por 15 minutos. Si la irritación persiste, consulte a un médico.

Contacto con la piel: lave las áreas expuestas con jabón y agua.

Inhalación: Ninguna, bajo condiciones normales de uso. Tome aire fresco.

Ingestión: En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y enjuague la boca con agua. Consultar a un médico o centro de intoxicaciones si presenta síntomas. Si la persona está inconsciente, no se le proporcione nada para ingerir, lleve la etiqueta del producto al solicitar atención médica.